


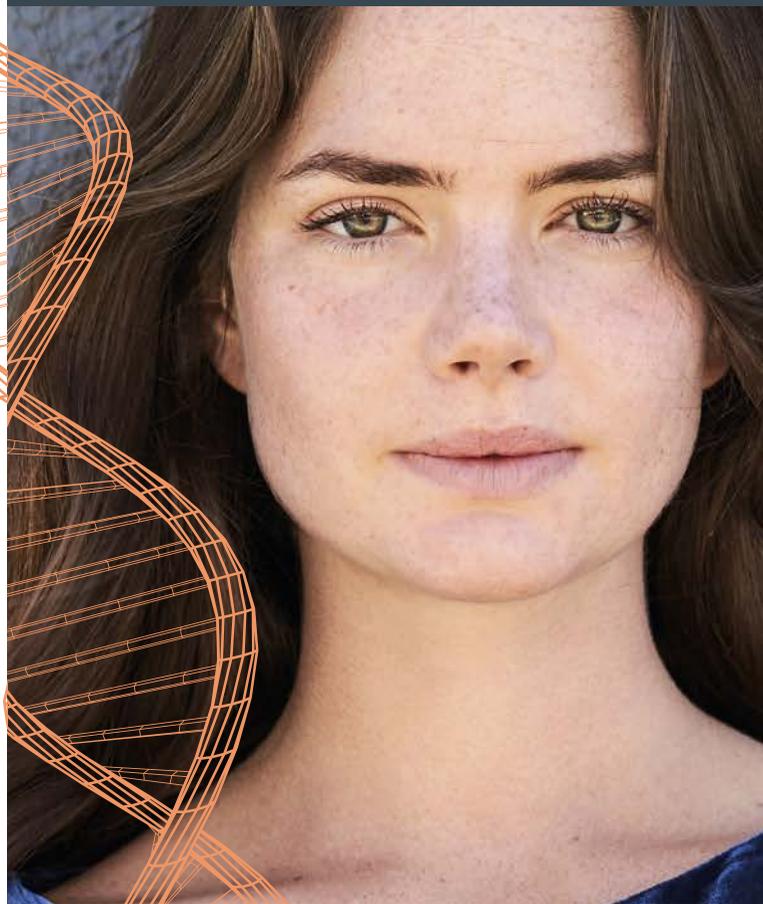

**BILHI**  
SKIN  
KELOID

MODE D'EMPLOI



**BILHI**  
GENETICS


Nous contacter

19 rue Roux de Brignoles, Marseille 6<sup>ème</sup> – France  
[www.bilhigenetics.com](http://www.bilhigenetics.com) - [office@bilhigenetics.com](mailto:office@bilhigenetics.com)

*Drive the future  
of your health*


**BILHI**  
GENETICS

## MODE D'EMPLOI BOÎTE

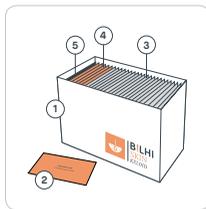

1. Boîte
2. Documentation à l'attention du praticien (notice d'utilisation des résultats du test et notice d'information)
3. Kits
4. Documents vierges (bons de demande, notices d'information et d'utilisation à destination des patients)
5. Questionnaires de refus

## MODE D'EMPLOI KIT

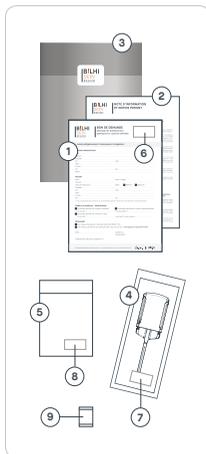

1. Bon de demande (incluant le consentement patient et l'attestation de consultation) à remplir et insérer dans l'enveloppe pré-affranchie à destination du laboratoire
2. Notice d'information et d'utilisation (à destination du patient)
3. Enveloppe extérieure pré affranchie
4. Test FTA
5. Enveloppe de protection du test FTA utilisé
6. Étiquette avec numéro d'identification « Bon de demande »
7. Étiquette repositionnable avec numéro d'identification « Kit FTA »
8. Étiquette avec numéro d'identification « Enveloppe test FTA utilisé »
9. Sachet absorbeur d'humidité (présent dans l'enveloppe de protection du test FTA utilisé)

## PROCÉDURE DE PRÉLÈVEMENT

1

Sortez tous les éléments de l'enveloppe extérieure et vérifiez que les 3 étiquettes d'identification concordent.

2

Remplissez, avec le patient le bon de demande, le consentement ainsi que l'attestation de consultation (document n°1). N'oubliez pas de demander au patient d'indiquer son mode de paiement.

3

Fournissez la notice d'information et d'utilisation (document n°2) au patient. Il doit la lire et la conserver.

4

Procédez au prélèvement : demandez au patient d'ouvrir l'emballage du test FTA (élément n°4), en prenant bien soin de ne pas endommager l'étiquette repositionnable (élément n°7).

## LE PATIENT PROCÈDE AU PRÉLÈVEMENT EN SUIVANT LA MARCHE À SUIVRE CI-DESSOUS :



Ouvrir l'emballage et retirer le collecteur sans toucher l'extrémité de l'éponge.



Placer l'éponge aussi profondément que possible au fond de la bouche et frotter l'intérieur de la joue et sous la langue pour récolter le plus de salive possible. Recommencer sur l'autre joue.



Tenir le collecteur droit (comme sur l'image) et faire glisser la protection vers le bas pour qu'elle s'ouvre.



Replier l'écouvillon jusqu'à ce que l'éponge touche le papier FTA. Le papier change de couleur au contact de l'écouvillon.



Fermer la protection en la faisant glisser jusqu'à l'alignement des flèches de part et d'autre et jusqu'à entendre un « clic ».



Apposer l'étiquette d'identification du kit préalablement remplie. Une fois la carte FTA sèche, placer le kit dans son enveloppe de protection puis dans l'enveloppe pré affranchie avec le bon de demande, l'ordonnance, et le règlement, s'il est réalisé par chèque.

Vérifiez que le patient appose l'étiquette repositionnable à l'emplacement prévu sur le test FTA.

Une fois la procédure terminée, le patient insère le test FTA dans l'enveloppe de protection du test FTA utilisé (élément n°5), referme l'enveloppe, et insère le tout dans l'enveloppe extérieure pré affranchie (élément n°3).

Insérez à votre tour dans l'enveloppe extérieure pré affranchie : le bon de demande dument rempli et le règlement (s'il est effectué par chèque). **Postez !**